

BIOYAL

Gocce oculari a base di acido ialuronico sale sodico 0,1% ed acque distillate di fiordaliso e camomilla

RINFRESCANTE E IDRATANTE
UTILIZZABILE CON LENTI A CONTATTO

20 contenitore monodose da 0,5 ml

Istruzioni per l'uso

Le gocce di BIOYAL sono una soluzione oftalmica sterile a base di acido ialuronico sale sodico ed acque distillata di Fiordaliso e Camomilla.

L'acqua distillata di fiordaliso è utilizzata per le sue proprietà astringenti, decongestionanti ed antiarrossanti, mentre l'acqua distillata di camomilla possiede un'azione lenitiva e rinfrescante. L'acido ialuronico sale sodico è impiegato per le sua azione idratante che contrasta la secchezza oculare, contribuendo umettare e lubrificare al mucosa oculare. Le acque distillate vegetali alleviano l'arrossamento, l'affaticamento e la sensazione di corpo estraneo della mucosa oculare causati da fattori ambientali quali vento, fumo, inquinamento, esposizione prolungata a raggi solari, salsedine, acqua del mare e della piscina

Le gocce di BIOYAL inoltre donano sollievo ad occhi stressati dall'uso delle lenti oculari, del computer o a causa di un lungo periodo di guida o di studio.

COMPOSIZIONE

acqua distillata di fiordaliso, acqua distillata camomilla, acido ialuronico sale sodico, sodio fosfato bibasico eptaidrato, sodio fosfato monobasico biidrato, Sodio cloruro, acqua p.p.i. q.b. a 100 ml

Non contiene conservanti.

Peso molecolare Acido ialuronico sale sodico:
1500000-17000000 Da

ISTRUZIONI D'USO

Staccare un monodose e aprirlo ruotando ed estraendo il cappuccio.

Instillare 2-3 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il monodose.

Ripetere, se necessario, l'operazione più volte al giorno.

Dopo l'uso, richiudere immediatamente il monodose: il contenuto può essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.

Il prodotto è monopaziente.

Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.

Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di

erogazione del contenitore

Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.

In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.

Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare a temperatura ambiente (15°C-25°C).

Il contenuto del monodose può essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.

CONFEZIONAMENTO

20 contenitori monodose sterili richiudibili da 0,5 ml

VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione.



COC Farmaceutici S.r.l.

Via Modena, 15 - Sant'Agata Bolognese (BO)
40019

Distribuito da:

Bioell Oftalmica S.r.l.

Via dei Giuochi Istmici, 16
00135 Roma

Data ultima revisione: 02.01 del 06/2015



DISPOSITIVO MEDICO

STERILE A

