

Blefaloe

20 garze imbevute
detergenti perioculari



Istruzioni per l'uso

INDICAZIONI

Blefaloe è un preparato costituito da salviettine monouso imbevute, a base di Aloe e Acido Jaluronico.

La particolare formulazione è indicata per l'igiene perioculare di palpebre e ciglia. Blefaloe svolge una efficace azione detergente, lenitiva ed emolliente. Blefaloe garze è particolarmente indicato prima o dopo qualunque tipo di intervento di chirurgia oftalmica.

MODALITA' D'USO

Dopo aver pulito le mani, aprire la bustina ed estrarre la garza e tenendo l'occhio chiuso, passare la garza delicatamente sulla palpebra e sulle ciglia, con piccoli movimenti circolari per asportare eventuali secrezioni oculari, quali depositi di polveri, trucco, smog etc. Ripetere l'operazione anche per l'altro occhio, utilizzando una garza nuova. Non è necessario il risciacquo dopo l'uso.

SOSTANZE FUNZIONALI

Per singola garza: Estratto di Aloe vera 1%, Acido Jaluronico 0,3%.

INGREDIENTI:

Aqua, glycerin, aloe barbadensis extract, sodium hyaluronate, algin, sodium hydroxide, phenoxyethanol.

MISURE PRECAUZIONALI ED AVVERTENZE

- Non utilizzare il prodotto se il contenitore o le bustine risultassero alterate o danneggiate al momento della prima apertura.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente del prodotto.
- Conservare a temperatura ambiente.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare il medico.

CONFEZIONE

20 garze monouso.

Bioell Oftalmica s.r.l. - Roma